

豚精液希釈保存用

リター-max[®] PB

1箱：1L用分包×10個入

PIC-BIO


株式会社ピアイシィ・バイオ

【特 長】

◆Point.1 直進性 ◎

◆Point.2 保存性 ◎

◆Point.3 溶解性 ◎

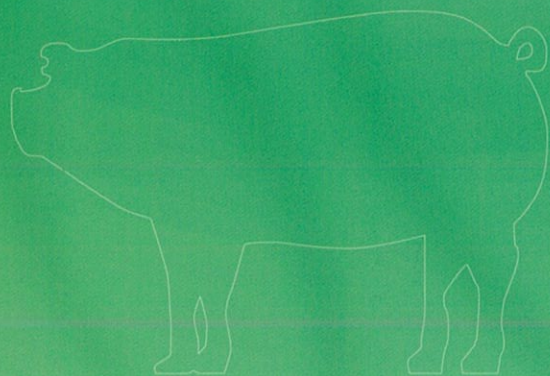

PIC-BIO, Inc. Tokyo JAPAN

特許第5980499号

日 本 製

安全安心 高品質

豚精液希釈保存用

リターマックスPB[®]

1 L 用

【特 徴】

- ・ 原材料はすべて食品または食品添加物で、厳格な衛生管理下の食品工場で作られています。
- ・ 顆粒にすることで、成分の均質さと安定性を向上させました。
- ・ 溶解性が良く、泡立ちは少なく精子をやさしく守ります。
- ・ 使用時の覚醒と運動性(活力・直進性)に優れています。

【使用方法】


- 1) 予め本品1包を30～38℃の精製水1ℓで溶解してください。(高温不可)
- 2) 精子との温度差(1℃以内で)に注意し、ゆっくりと混ぜ合わせて希釈してください。
- 3) 精液の推奨希釈倍率は7～15倍の範囲です。
- 4) 精液希釈後の急激な温度低下は避けてください。
- 5) 精液希釈後の保存温度は15～17℃です。

【保管方法】

高温・多湿・直射日光を避け冷暗所に保管してください。
開封後は速やかにご使用ください。

【注意事項】

- 本品は豚の精液希釈保存用製品です。
- 本品は医薬品、飼料添加物、飼料ではありません。

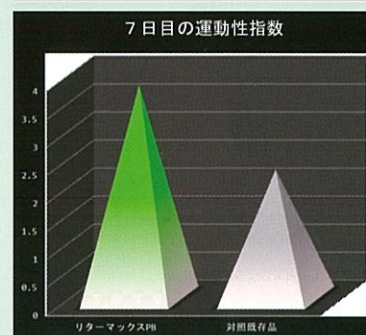

◆◆◆ フィールド・テスト結果 ◆◆◆

■少精子数での受胎率テスト

栃木県A農場

精子数20億の受胎率 : > 95%

■総産子数の増加

神奈川県B農場

(他社製品) 12.4 ⇒ 13.1 (本品)

今井養豚(埼玉) 今井 笑様

☆ 推薦します! ☆

増田畜産 緑ヶ丘牧場 木村 弥幸様



製造の試験段階から使用させていただいており精液と混ぜたときにショックも非常に少なく安心して使えます。また食品・食品添加物が原料で国産の割に安価というのがとても魅力的で、私自身もいままではいろんな方に紹介してきたがかなり好印象です。精製水と混ぜて使う粉末タイプですが、粒子が細かいので冬場でも溶け残りがなくすぐに溶けるので簡単に使っています。



今まで、ありとあらゆる市販の希釈剤(10数種類)を使い、自家配合もしたことがあります。リターマックスが一番です。発売前から性能試験に携わらせてもらいましたが、溶媒と溶液が混ざりやすい(溶けやすい)、泡立たない、食品なので安心とメリットは多いです。何より精子の生存性が良く弊社では平均で一頭近い成績アップにつながりました。安価ながらにこれだけの結果がついてくるので他剤の追従を許さないと感じています。

発売元

PIC-BIO

株式会社ピアイシィ・バイオ
東京都品川区西五反田 1-29-2
電話: 03-3490-8220 (代表)
URL: www.bio-live.com

PIC-BIO, Inc. Tokyo JAPAN